



კარბი საწმენდი საშუალება,
მასალებთან კარბი
შეთავსებალობა

Mikrobac® forte

უაღდემკიდო საღებინფექციო საშუალება, არ აქვს მძაფრი სუნი. ეფექტურობის
ფართო სპექტრი

პროდუქტის მონაცემები ■ ეფექტურობის ფართო სპექტრი ■ არ შეიცავს ალდეჰიდებს ■ კარგი გამწმენდი ■ მასალებთან კარგი შეთავსებალობა შემადგენლობა აქტიური ინგრედიენტები: Benzyl-C12-18-alkyldimethylammonium chlorides 199 mg/g, N-(3-aminopropyl)-Ndodecylpropane-1,3-diamine 50 mg/g. მიკრობიოლოგია ■ ბაქტერიციდული ■ საფუარა სოკოს საწინააღმდეგო ■ ტუბერკულოციდური ■ ვირუსციდული ხვეული ვირუსებისადმი (HBV, HIV, HCV) ■ ადენო-, პოლიომა-, და როტავირუსების საწინააღმდეგო	გამოყენების სფეროები Mikrobac® forte გამოიყენება მოსარეცხი ზედაპირების დეზინფექციისათვის შემდეგ აღვლინებში: ■ სამედიცინო აღჭურვილობისათვის ■ საავადმყოფოებში ■ ინდუსტრიულ სამზარეულოებში და საკვების წარმოების ადგილებში გამოყენება Mikrobac® forte გამოიყენება კონცენტრატის სახით. მთლიანად დასველეთ ადგილები ხსნარის საჭირო რაოდენობით. მოახდინეთ მყარი ზედაპირების დეზინფექცია 1% 1სთ. განმავლობაში. ამ დროის გასვლის შემდეგ გარეცხეთ გაწმენდილი ადგილების და საგნები სასმელი წყლით. გთხოვთ დაიცვათ მწარმოებლის ინსტრუქციები. კარგად გარეცხეთ დამუშავებული ნივთები წყლით. ნივთები ხელმეორე გამოყენებამდე კარგად გარეცხეთ წყლით. ყოველთვის მოამზადეთ პრეპარატი ცივი (ოთახის ტემპერატურის) წყლით. მოერიდეთ ამონებიანი და ალდეჰიდებიანი პროდუქტების კონტაქტს. ალდეჰიდიანი პროდუქტის Mikrobac® forte –ს პრეპარატით დეზინფექციის წინ მოახდინეთ წინასწარი წმენდა. არ არის რეკომენდირებული ინვაზიური სამედიცინო აღჭურვილობის დეზინფექციისათვის <i>ფრთხილად გამოიყენეთ. გამოყენებამდე ყოველთვის გაეცანით კტიკებს და პროდუქტის შესახებ ინფორმაციას.</i>	მასალებთან შეთავსებალობა Mikrobac® forte ტესტირებული იყო შემდეგ მასალებთან შეთავსებალობაზე: მეტალები: უჟანგავი ფოლადი, (V2A) ალუმინი, სპილენძი, ლატუნი პლასტიკი: პოლიამიდი, პოლიეთილენი, პოლიპროპენი, პოლისტირინი, PVC, აკრილო-ბუტადინ-სტიროლი, სილიკონი, რეზინი, კოლოპიმერი, მაკროლონი, აკრილური შუშა, Teflon®, Vivak® clear 099. სწორად გამოყენების შემთხვევაში მასალების დაზიანება არ მოხდება ჩამონათვალი Certification/list issued by the Association for Applied Hygiene (VAH) List issued by the German Veterinary Medical Society (DVG) for Food Hygiene CE-labelling in accordance with the Medical Device Directive (MDD) List of tested cleaning agents for ceramic tiling and cladding in swimming pools (RK list)
---	--	--

Bacteria and Fungi EN Phase 2 / Step 1 Efficacy according to EN Norm Phase 2 / Step 1 (suspension tests), tested under clean / dirty conditions Bactericidal (EN 13727) - clean conditions 1.0 ml/l 0.1 % - 5 min. Yeasticidal (EN 13624) - clean conditions 1.0 ml/l 2.5 ml/l 10.0 ml/l 0.1 %	Viruses EN Phase 2 / Step 1 Efficacy according to EN Phase 2 / Step 1 (suspension tests), tested under clean / dirty conditions Adenovirus (EN 14476) - clean conditions 40.0 ml/l 4.0 % - 4 hrs. - dirty conditions 40.0 ml/l 4.0 % - 4 hrs. Efficacy against viruses (German Society for the Control of Viral Diseases [DVV]) Virucidal against enveloped viruses (incl. HBV, HIV, HCV)
--	---

0.25 % 1.0 % 15 min. 5 min. 1 min. - dirty conditions 2.5 ml/l 5.0 ml/l 0.25 % 0.5 % 30 min. 5 min. EN Phase 1 / Basic tests Efficacy according to EN Phase 1 (Basic tests / suspension tests) without contamination; does not define the applicability of a product for a specific purpose Bactericidal (EN 1040) 1.0 ml/l 0.1 % - 1 min. Yeasticidal (EN 1275) 1.0 ml/l 2.5 ml/l 0.1 % 0.25 % 15 min. 1 min. VAH Certified application recommendations for prophylactic wet-wipe disinfection from the Association for Applied Hygiene (VAH). Based on suspension and practical tests, tested under clean conditions (i.e. optically clean surfaces) / dirty conditions (i.e. visibly contaminated surfaces) Bactericidal/Yeasticidal - clean conditions 2.5 ml/l 5.0 ml/l 10.0 ml/l 15.0 ml/l 20.0 ml/l 0.25 % 0.5 % 1.0 % 1.5 % 2.0 % 4 hrs. 1 hr. 30 min. 15 min. 5 min. -DGHM tuberculocidal (M.terrae) 20.0 მლ/ლ 2,0%- 2 სთ; 25,0 მლ/ლ 2,5% - 1 სთ	2.5 ml/l 5.0 ml/l 0.25 % 0.5 % 30 min. 5 min. Appraised efficacy against enveloped viruses (in accordance with DVV) SARS-CoV 5.0 ml/l 0.5 % - 30 min. Appraised efficacy against non-enveloped viruses (DVV) Adenovirus 15.0 ml/l 1.5 % - 4 hrs. Polyomavirus 5.0 ml/l 10.0 ml/l 0.5 % 1.0 % 2 hrs. 30 min. Appraised efficacy against non-enveloped viruses (in accordance with DVV) Rotavirus 2.5 ml/l 0.25 % - 5 min. Appraised efficacy against non-enveloped viruses (in accordance with EN) MNV - clean conditions 20.0 ml/l 2.0 % - 4 hrs. - dirty conditions 40.0 ml/l 4.0 % - 4 hrs. (Food) Industry Certified Efficacy for surface disinfection in the food sector of the German Veterinary Medical Society (DVG) bactericidal and fungicidal. Based on suspension tests, tested under the conditions for the application field A - less soiled (20 °C) 5.0 ml/l 15.0 ml/l 0.5 % 1.5 % 1 hr. 30 min. - less soiled (10 °C) 10.0 ml/l 20.0 ml/l 1.0 % 2.0 % 1 hr. 30 min. - heavily soiled (20 °C) 10.0 ml/l 20.0 ml/l 1.0 % 2.0 % 1 hr. 30 min. - heavily soiled (10 °C) 20.0 ml/l 30.0 ml/l 2.0 % 3.0 % 1 hr. 30 min. ქიმიურ-ფიზიკური მონაცემები: - pH ღონე დაახლ. 8-9 0.5% ხსნარი pH ღონე დაახლ. 8 - სიმკვრივე (20°C-ზე) დაახლ. 1.01 გ/სმ³ სტაბილურობა: გახსნის შემდეგ მჭიდროდ დახურულ კონტეინერში 12 თვე დისპენსერში 28 დღე
--	---

პრეზენტაცია:

20მლ. პატარა პაკეტი, 5ლ. კანისტრა

შენიშვნა: რეკომენდაციები მოცემულია კეთილსინდისიერად, სხვა დამატებითი ინფორმაცია ხელმოსაწვდომია მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში. ჩვენი რეკომენდაციები არ მოიცავს ვალდებულებებს და არ წარმოადგენს გარანტიას. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას. ჩვენი პასუხისმგებლობა მოიცავს მხოლოდ გაყიდვებისა და მოწოდების უზრუნველყოფას. ჩვენს მიერ მოწოდებული პიგიენისა და დეზინფექციის პროდუქტები უზრუნველყოფს საუკეთესო ხარისხს. www.bode-science-center.com

PAUL HARTMANN AG

89522 Heidenheim

Germany

მეტი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ვებ-გვერდს: www.bode-chemie.com